


SORBACT® ABSORPTION DRESSING

Mikroobe siduv imav haavaside

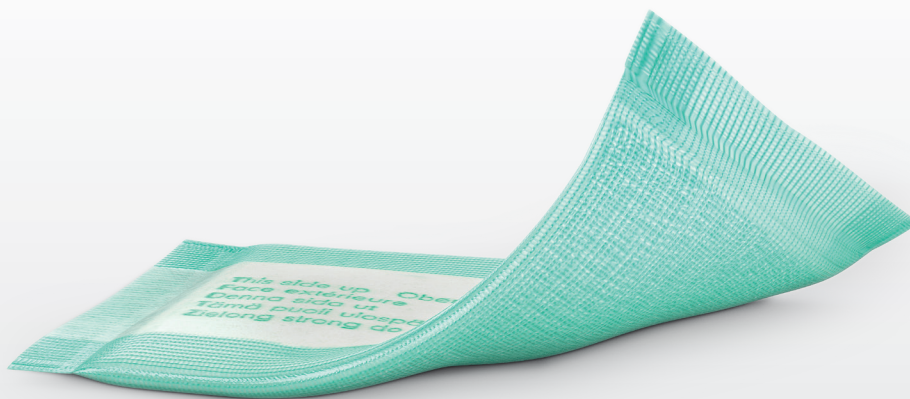

VÄHENDAB MÕÖDUKALT KUNI ROHKELT EKSDAATI ERITAVATE HAAVADE BIOKOORMUST

Sorbact® Absorption Dressing on baktereid ja seenorganisme siduv haavaside. Sellel on roheline haavakontaktkiht Sorbact® ning imav sisu ja valge tagakülg. Sorbact® Absorption Dressing imab eksudaati ja hoiab seda endas, vähendades matseratsiooni (nahakudede lagunemise) ohtu ja soodustades niisket haavakeskkonda. Haavasidet võib kompressioon-teraapias kasutada.

Toode	Tootekood	Suurus	Tk/pakis
Sorbact® Absorption Dressing	98224	7 x 9 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98222	10 x 10 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98225	10 x 10 cm	10
Sorbact® Absorption Dressing	98223	10 x 20 cm	10




KASUTUSALAD

Sorbact® Absorption Dressing on mõeldud puhta, saastunud, mõõdukalt kuni rohkelt eksudaati eritava koloniseeritud või nakatunud haava hooldamiseks (nt operatsioonihaavad, traumahaavad, lamatishaavandid, diabeetilised haavandid ja jalahaavandid).

KASUTUSJUHEND

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt ette.
2. Valige haavale sobiva suurusega haavasideme. Haavapadi peab haava servadest vähemalt 2 cm üle ulatuma.
3. Kasutage haavasideme ümbrise eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
4. Pange side haavale. Veenduge, et roheline haavaga kokku puutuv kiht kataks kogu haavapinna.
5. Fikseerige haavasideme nõuetekohaselt.
6. Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest seisundist. Kui kliiniline seisund seda võimaldab, võib sideme jätta haavale kuni seitsmeks päevaks.

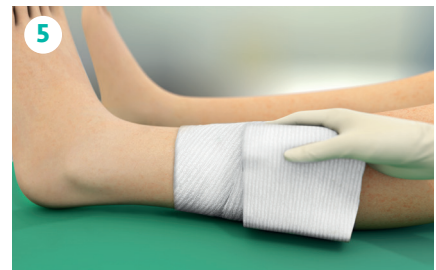

Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE

Sorbact® mikroobe siduv haavasideme ennetab biokoormuse vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haavainfektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja eemaldatakse sideme vahetamisel.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasideme tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.