


SORBACT[®] SURGICAL DRESSING

Mikroobe siduv haavaplaaster

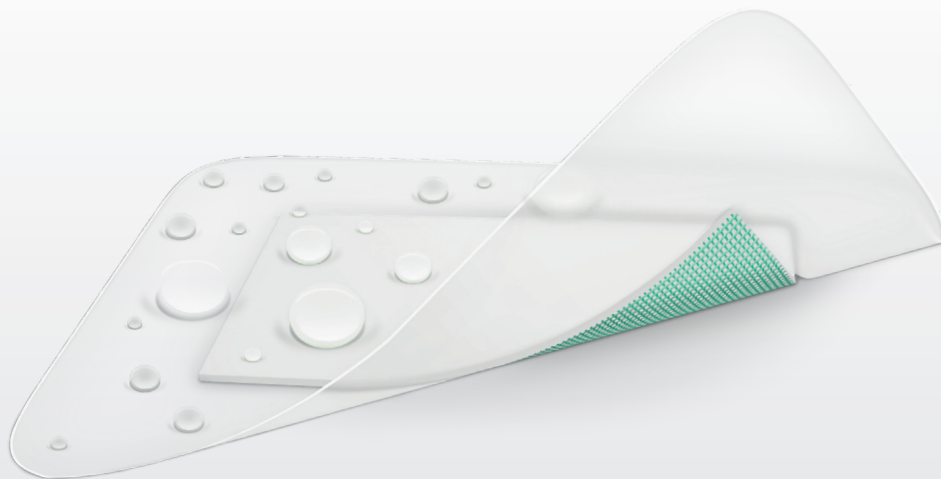

VÄHENDAB OPERATSIOONIIAAVA INFEKTSIOONIOHTU OLULISELT¹


Sorbact[®] Surgical Dressing on baktereid ja seenorganisme siduv steriilne hhaavaplaaster. Sellel on roheline haavakontaktkiht Sorbact[®], imav haavapadi ja läbipaistev akrüül-liimi riba. Sorbact[®] Surgical Dressing imab eksudaati ja hoiab seda endas ning aitab kaasa niiskele haavakeskkonnale. Veekindel tagakile kaitseb välissaaste eest ja laseb liigsel vedelikul aurustuda.

Toode	Tootekood	Suurus	Padja suurus	Tk/pakis
Sorbact [®] Surgical Dressing	98140	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	100
Sorbact [®] Surgical Dressing	98141	8 x 10 cm	4 x 6,5 cm	20
Sorbact [®] Surgical Dressing	98142	8 x 15 cm	4 x 11 cm	20
Sorbact [®] Surgical Dressing	98143	10 x 20 cm	5 x 15 cm	20
Sorbact [®] Surgical Dressing	98144	10 x 25 cm	5 x 20 cm	20
Sorbact [®] Surgical Dressing	98145	10 x 30 cm	5 x 25 cm	20
Sorbact [®] Surgical Dressing	98146	10 x 35 cm	5 x 30 cm	20



KASUTUSALAD


Sorbact® Surgical Dressing on mõeldud puhta, saastunud, kuiv või väheses koguses esku-daati eritava koloniseeritud või nakatunud haava hooldamiseks (näiteks operatsioonihaavad, traumahaavad, nt rebendhaavad, löikehaavad ja marrastused).

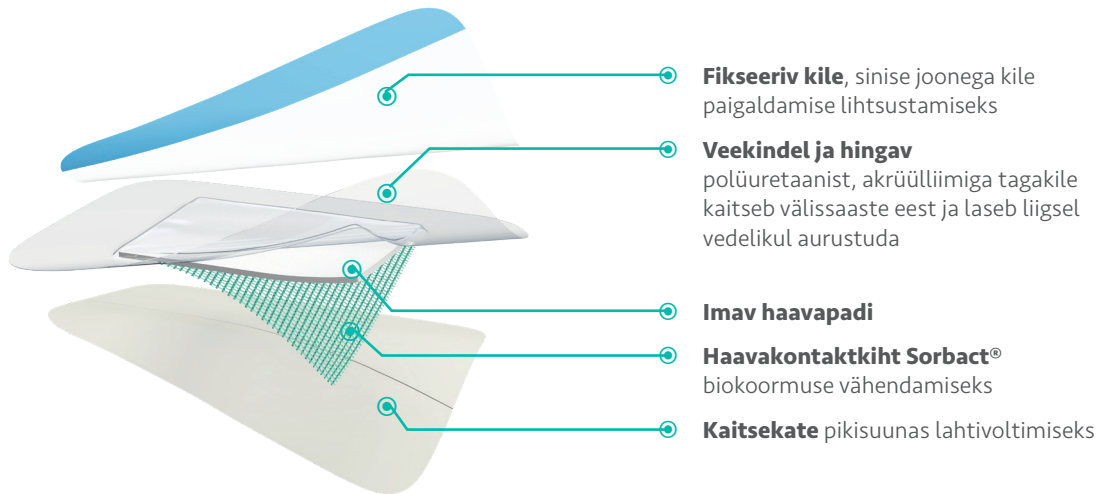

KASUTUSJUHEND

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt ette. Veenduge, et ümbritsev nahk oleks puhas ja kuiv.
2. Valige haavale sobiva suurusega haavaside.
3. Kasutage haavasideme ümbrise eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
4. Eemaldage haavasideme haavaga kokkupuutuvalt poolelt kaitsekile.
5. Pange side haavale. Veenduge, et roheline haavakontaktkiht kataks kogu haavapinna.
6. Suruge klepservad ümbritseva naha vastu.
7. Eemaldage pealmine fikseeriv kilekiht.

Kui kliiniline seisund seda võimaldab, võib sideme jätta haavale kuni seitsmeks päevaks.

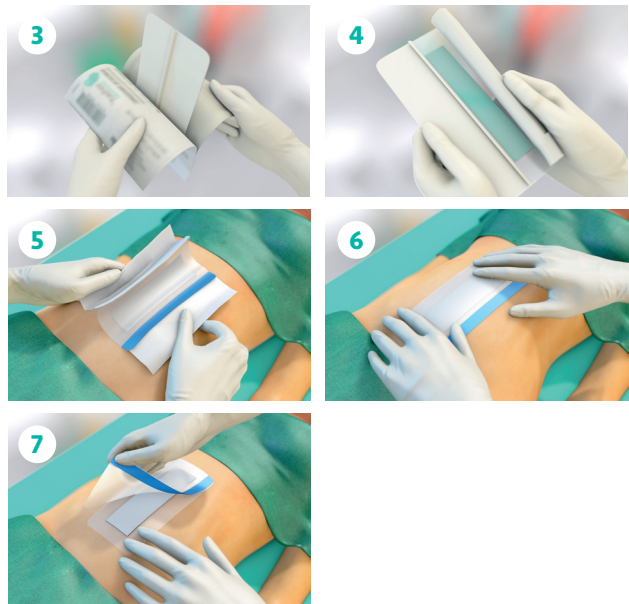

Viide: 1. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Hosp Infect Epidemiol* 2016; [in press].

Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE

Sorbact® mikroobe siduv haavaside ennetab biokoormuse vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haavainfektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja eemaldatakse sideme vahetamisel.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasideme tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.