

SORBACT® ROUND SWAB

Mikroobe siduv ümmargune tampoon



PUHASTAMISEKS VÕI HAAVATÄITENA KASUTAMISEKS

Sorbact® Round Swab on baktereid ja seenorganisme siduv steriilne haavatampoon. Sellel on ümmarguseks tampooniks keeratud roheline haavakontaktkiht Sorbact®, mida hoiab koos silikoonrõngas.

Toode	Tootekood	Suurus	Tk/pakis
Sorbact® Round Swab	98126	läbimõõt 3 cm	70 (5 x 14)



KASUTUSALAD


Sorbact® Round Swab sobib haava puhastamiseks või haavatäitena kasutamiseks puhta, saastunud, vedelikku eritava koloniseeritud või nakatatud haava puhul, nt väiksemad sügavad haavad.

KASUTUSJUHEND – HAAVA PUHASTAMINE

1. Kasutage haavasideme ümbrisest eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
2. Niisutage toodet Sorbact® Round Swab irrigatsioonilahusega (nt soolalahus); pigistage liigne vedelik välja.
3. Puhastage haava õrnalt kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt.

KASUTUSJUHEND – HAAV

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt ette.
2. Kasutage haavasideme ümbrisest eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
3. Sügava haava puhul asetage haavaside selliselt, et see puutuks vastu kogu haavapinda.
4. Kasutage sobivat sekundaarset sidet.
5. Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest seisundist. Kui kliiniline seisund seda võimaldab, võib sideme jätta haavale kuni seitsmeks päevaks.

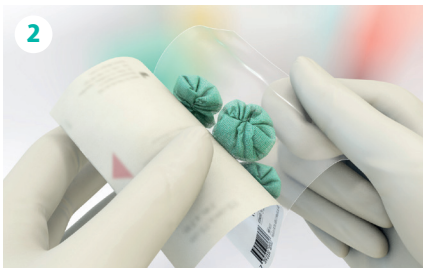

Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE

Sorbact® mikroobe siduv haavaside ennetab biokoormuse vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haavainfektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja eemaldatakse sideme vahetamisel.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasideme tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.