


SORBACT® SUPERABSORBENT

Mikroobe siduv üliimav haavaside

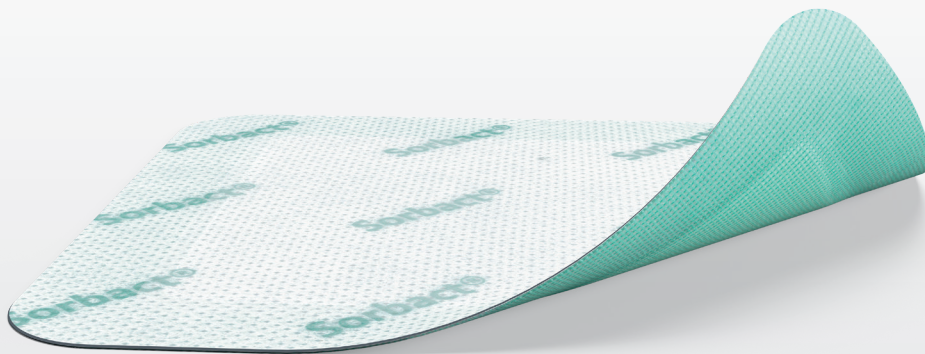

VÄHENDAB ROHKESTI EKSUDAATI ERITAVA HAAVA BIOKOORMUST


Sorbact® Superabsorbent on baktereid ja seenorganisme siduv steriilne, üliimav haavaside. Sellel on roheline haavakontaktkiht Sorbact® ja üliimav sisu ning vetthülgav lisakiht eksudaadi läbiimbumise ennetamiseks.

Toode	Tootekood	Suurus	Tk/pakis
Sorbact® Superabsorbent	98501	10 x 10 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98502	10 x 20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98503	20 x 20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98504	20 x 30 cm	10





KASUTUSALAD

Sorbact® Superabsorbent on mõeldud puhta, saastunud, palju kuni rohkesti eksudaati eritava koloniseeritud või nakatunud haava hooldamiseks (nt operatsioonihaavad, traumahaavad, lamatishaavandid, diabeetilised haavandid ning labajala- ja jalahaavandid).

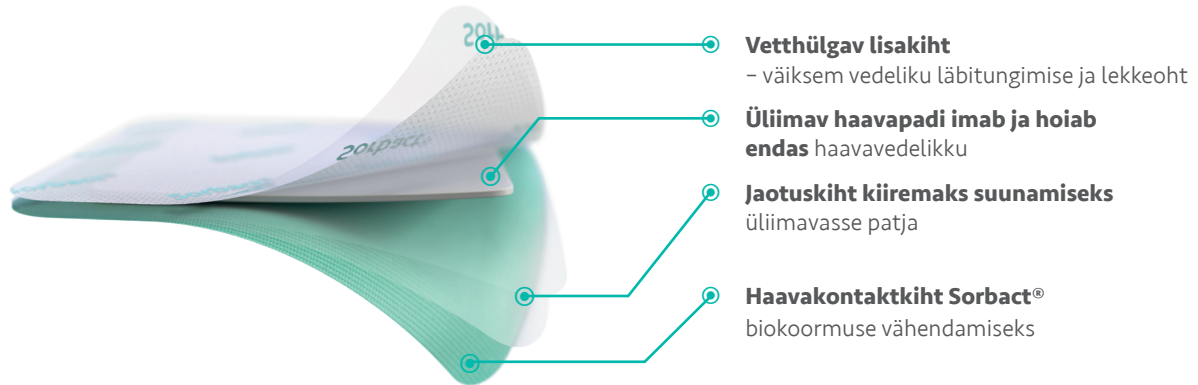

KASUTUSJUHEND

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt ette.
2. Valige haavale sobiva suurusega haavaside. Haavapadi peab haava servadest vähemalt 2 cm üle ulatuma.
3. Kasutage haavasideme ümbrise eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
4. Pange side haavale. Veenduge, et haavasideme roheline pool kataks kogu haava pinna.
5. Fikseerige haavasideme servad ribaplaastriga või siduge sidemega. Veenduge, et fikseeritud haavaside ei oleks jäik.
6. Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest seisundist. Määrduvad haavaside tuleb vahetada. Sobib kompressioonteraapias kasutamiseks.

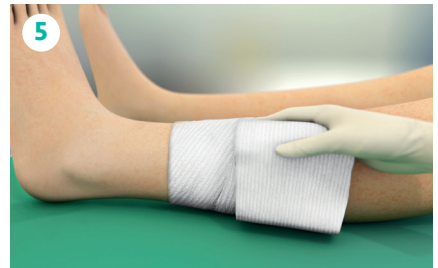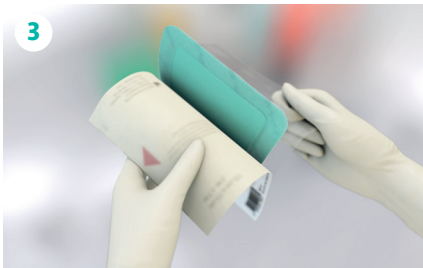

Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE

Sorbact® mikroobe siduv haavaside ennetab biokoormuse vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haavainfektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja eemaldatakse sideme vahetamisel.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasideme tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.